

BLI FRI FRÅN GLASÖGON OCH KONTAKTLINSER!



A scenic view of a coastal town and ocean seen through a natural rock archway. The archway is made of dark, rugged rock, framing the view. The sky is a clear, pale blue. Below the sky, a vast expanse of deep blue ocean stretches towards the horizon. In the foreground, a coastal town with numerous buildings and houses is visible, nestled along the shoreline. A sandy beach and some greenery are also visible near the town. The overall scene conveys a sense of freedom and natural beauty.

Den visuella friheten du förtjänar

Slopa immiga glasögon och torra kontaktlinser.

Med EVO ICL (EVO) kan du låsa upp den visuella friheten och ett liv som är rikt på nya upplevelser.

EVO kan hjälpa dig att **se världen som den är avsedd att skådas** – med skarp och tydlig syn.¹



En historik med framgång för ICL

Över

30 ÅR

i ögonen runt om i världen

med

3 000 000+

distribuerade ICL:er

**EXCEPTIONELL
PATIENTNÖ-
JDHET**

99,4 % av de tillfrågade patienterna säger
att de skulle göra ingreppet igen.²

Fördelar med EVO ICL

UTMÄRKT SYN DAG OCH NATT



Upplev vad livet har att erbjuda under dagen **utan att tumma på nattsynen.**^{1,3}

Dag och natt kan du lita på EVO när det gäller utmärkt syn.^{1,3}



.....| **I HARMONI MED DITT NATURLIGA ÖGA**



På samma sätt som man sätter i en lins i en kamera är EVO additivt och fungerar tillsammans med ditt ögas naturliga delar för att förbättra din syn.

.....| **INGEN TORRHETSKÄNSLA**



Kliniskt bevisad att inte orsaka eller förvärra torrhetsskänsla.⁴

.....| **DIN FRAMTID ÄR LJUS OCH SKYDDAD**



EVO består av Collamer®, ett material som har visat sig vara säkert i ögat. Collamer ger ett UV-skydd och innehåller kollagen, som är ett naturligt förekommande protein i kroppen.

Skapad för ditt välmående

GJORD AV COLLAMER – ETT SÄKERT, BIOKOMPATIBELT MATERIAL AV HÖG KVALITET

Collamer är biokompatibelt med ditt öga och består av kollagen, som är ett **protein som förekommer naturligt i din kropp**. Collamer har visat sig vara säkert och effektivt, och har producerats med material av hög kvalitet. Det används endast av STAAR Surgical i EVO.

MJUK OCH FLEXIBEL




EVO är idealisk för ditt öga på grund av dess **mjuka och flexibla struktur**. Du kommer inte ens att veta att den är där, förutom det faktum att du ser utmärkt.



Behåll trygghetskänslan

ETT LÖSTAGBART ALTERNATIV SOM GER DIG FLEXIBILITET INFÖR FRAMTIDEN

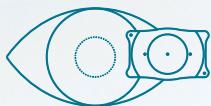


Även om EVO är designad för att permanent korrigera din syn kan en läkare i nödvändiga fall **avlägsna linsen** om det skulle förekomma en omfattande förändring i ögonens optik eller för att hålla jämna steg med tekniska framsteg samt dina synbehov i framtiden.




Hur ICL fungerar

STAAR Surgical's implanterbara lins korrigerar vanliga synproblem som närsynthet, astigmatism och långsynthet. **ICL placeras bakom iris (den färgade delen av ögat) och precis framför den naturliga linsen**, vilket hjälper dig att få en skarp och tydlig syn.¹



NÄRSYNTHET

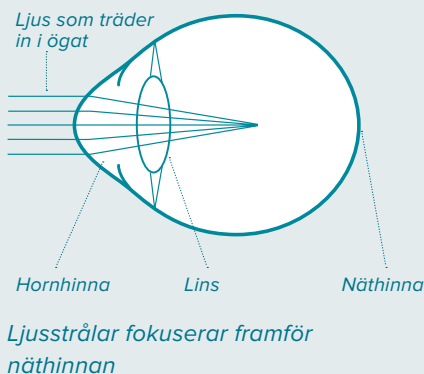


LÅNGSYNTHET (HYPEROPI)*

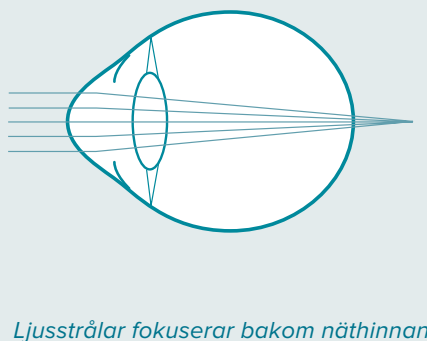

ASTIGMATISM

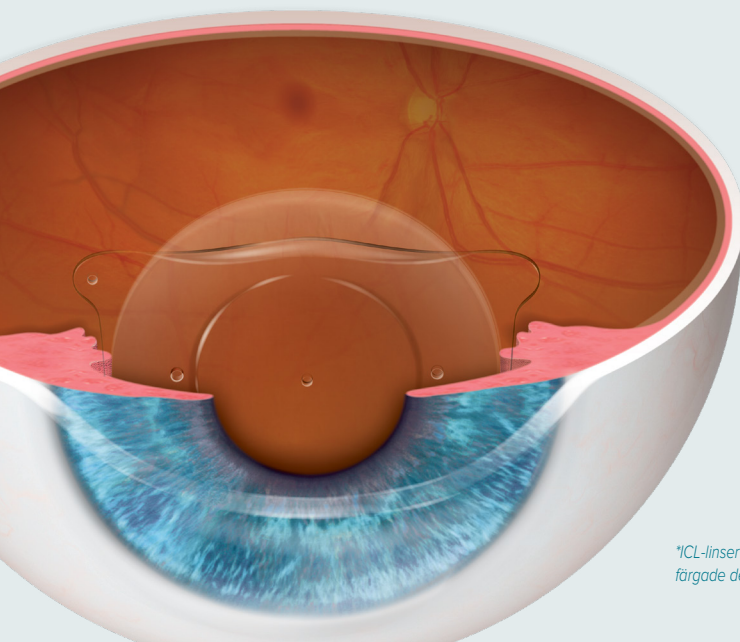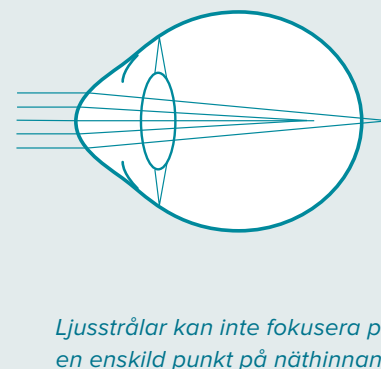

EFTER BEHANDLING

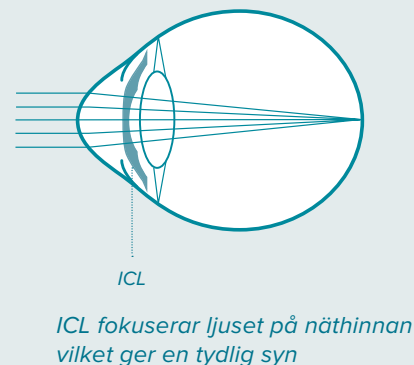

*ICL-linser avsedda att behandla långsynthet är inte EVO och kräver två ytterligare mycket små öppningar i den färgade delen av dina ögon för att se till att det finns ett ordentligt vätskeflöde efter att ICL har implanterats.

Snabbt och säkert ingrepp

Ingreppet med EVO är minst lika snabbt och går snabbare än att titta på ett avsnitt av din favoritserie. Det har en kort återhämtningstid.

Gör dig redo för visuell frihet!


Före dagen för ditt ingrepp med EVO kommer din läkare att utföra en rad standardtester för att mäta ditt ögas unika egenskaper.

Dags för din EVO-lins!

När du kommer inför ingreppet får du ögondroppar av din läkare för att vidga och bedöva ögat.

INGREPPET UTFÖRS I TRE ENKLA STEG*:

1

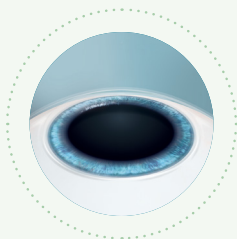


Din läkare kommer att göra en liten öppning i kanten av din hornhinna för att föra in **EVO**.

2



EVO viks och förs in genom den här lilla öppningen.

3

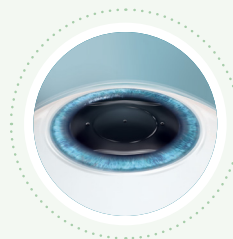

När linsen är insatt gör läkaren nödvändiga justeringar för att säkerställa att linsen är korrekt placerad i ögat.

EVO syns inte för dig eller andra.

Ingreppet är klart!

Många patienter märker av en förbättrad syn nästan omedelbart.

Vård efter ingreppet: Rådgör med din läkare för ytterligare information om återhämtningen.

*ICL-linser avsedda att behandla långsynthet är inte EVO och kräver två ytterligare mycket små öppningar i den färgade delen av dina ögon för att se till att det finns ett ordentligt vätskeflöde efter att ICL har implanterats.

Livet med ICL

Evolution in Visual Freedom

“

Att vara idrottare och ha synproblem är ett stort hinder. **Jag hade inte kunnat vara nöjdare med min syn.** Nu behöver jag bara fokusera på Jiu-Jitsu, stärka kvinnor och vara mamma.”



Eve Torres Gracie
Jiu-Jitsu-instruktör, före detta WWE Diva-mästare och skådespelare

“

När det gäller mitt liv med glasögon... bestod mitt liv av många små hinder. **Nu har jag Visian ICL**, och jag behöver inte tvivla på någon av de sakerna. Jag kan ta min kamera och mitt anteckningsblock och ta mig ut **och leva mitt liv obehindrat.**”



Andrew Oxenham
Professfotograf



“

Jag kan fortfarande **inte fatta att ett sådant mirakel har nått mina ögon**. Det är underbart. Jag kan se glädjen i mina ögon som nu strålar för att jag är så glad.”



Klaudia Giez
Professionell modell

“

Den implanterbara linsen **är naturlig och biokompatibel** med min kropp.”



Sara Tso
*Matchbox Kitchens
ägare och bagare*

“


Jag ville ha **ett ingrepp som var säkert för mig och som gav bra synkvalitet**. EVO ICL gav mig det alternativet.”



Adilson Pio, MD
Ögonläkare

FÖRESTÄLL DIG LIVET MED VISUELL FRIHET

UPPTÄCK MER OM EVO ICL IDAG!

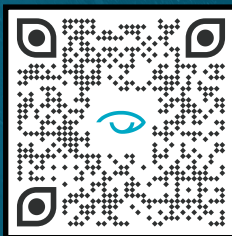

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

ICL är designad för korrigering/minskning av närsynthet hos patienter mellan 21 och 60 år, från -0,5 D till -20,0 D med eller utan astigmatism upp till 6,0 D och korrigering/minskning av hyperopi hos patienter, från 21 till 45 år, med hyperopi från +0,5 D till +16,0 D med eller utan astigmatism upp till 6,0 D. För att vara säker på att din kirurg använder en ICL med den lämpligaste effekten för dina ögon bör din närsynthet, långsynthet och astigmatism ha varit stabila i minst ett år innan du genomgår ögonkirurgi. ICL-kirurgi kan förbättra din syn utan glasögon eller kontaktlinser. ICL tar inte bort behovet för läsglasögon, även om du aldrig haft sådana förut. ICL är ett alternativ till andra refraktiva operationer inklusive laser-assisterad in situ keratomileusis (LASIK), fotorefraktiv keratektomi (PRK), snittoperationer eller andra metoder för att korrigera myopi, t.ex. kontaktlinser eller glasögon. Implantation av en ICL är ett kirurgiskt ingrepp och innebär därmed potentiella allvarliga risker. Nedanstående lista visar på de potentiella komplikationer/biverkningar som rapporterats i samband med refraktiv kirurgi i allmänhet: ytterligare kirurgi, kataraktbildning, förlust av bästa korrigerad syn, ökat tryck inuti ögat, förlust av celler på hornhinns innersta yta, konjunktival irritation, akut korneal svullnad, ihållande korneal svullnad, endoftalmit (total ögoninfektion), betydande bländning och/eller ljusringar, hyfema (blod i ögat), hypopyon (varbildning i ögat), ögoninfektion, dislokation av ICL, makulaödem, icke reaktiv pupill, glaukom pga pupillblockering, svår ögoninflammation, irit, uveit, glaskroppsförlust och hornhinnetransplantation. Innan du överväger att genomgå ICL-kirurgi ska du genomgå en komplett synundersökning och prata med din ögonläkare om ICL, särskilt om dess fördelar, risker och komplikationer. Du bör diskutera hur länge du behöver för att återhämta dig efter kirurgin. **Ytterligare information med potentiella förmåner, risker och komplikationer finns på [DiscoverICL.com](https://www.discovericl.com).**

REFERENSER

1. Martínez-Plaza E, López-Miguel A, López-De La Rosa A, et al. Effect of the EVO+ Visian Phakic Implantable Collamer Lens on Visual Performance and Quality of Vision and Life. Am J Ophthalmol 2021;226: 117–125. **2.** Packer M. The Implantable Collamer Lens with a central port: review of the literature. Clinical ophthalmology (Auckland, NZ). 2018;12:2427-38. **3.** Parkhurst GD. A prospective comparison of phakic collamer lenses and wavefront-optimized laser-assisted in situ keratomileusis for correction of myopia. Clin Ophthalmol. 2016 Jun 29;10:1209-15. **4.** Ganesh S, Brar S, Pawar A. Matched population comparison of visual outcomes and patient satisfaction between 3 modalities for the correction of low to moderate myopic astigmatism. Clin Ophthalmol. (Auckland, NZ). 2017;11:1253-63.

staar.com

©2022 STAAR® Surgical Company

Mer information finns på: **[discovericl.com](https://www.discovericl.com)**

MKT-0437-EU-SV Rev. 1

STAAR Surgical AG International
Hauptstrasse 104
CH -2560 Nidau, Schweiz
+41 32 332 88 88